



NS4000 사용 설명서

NS4000 귀마개 사용을 환영합니다.

원활한 착용을 위해 1-4단계의 지침을 참고해 주세요.

착용이 잘 되어야 효과를 느끼실 수 있습니다.


1

A면의 방향을 확인합니다.

NS4000 모델은 좌,우 구분이 없습니다.

기본 조립되어 있는 차음링은 스몰사이즈입니다.

외이도가 넓은 경우, 라지 차음링으로 교체해서 사용하세요.

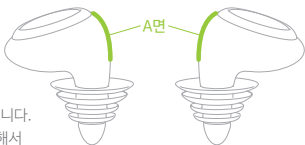

2

A면이 얼굴 앞쪽을 향하게 잡습니다.


귀마개를 넣으실 때 A면 방향이 틀어지지 않도록 주의바랍니다.




3

'귓바퀴를 당기며' 외이도에 귀마개를 넣어주세요.

반대쪽 손으로 귓바퀴를 당기시면 휘어져 있는 외이도가 일자로 쪽 늘어나 좀 더 쉽게 착용하실 수 있습니다.

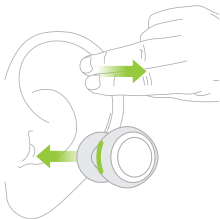

‘귓바퀴를 당긴 상태에서’ 귀마개를 끌고루 눌러 최대한 밀착시켜 주세요.

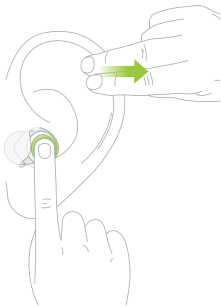

인체에 무리를 주지 않는 건강한 착용 방식을 지향합니다!

압력 조절 기능이 없는 기존 제품과 달리 에스이어는 인체 내부에서 발생하는 소리가 덜 들리기 때문에 착용 초기에는 외부 소리가 잘 들린다고 느껴지지만, 약 10분 정도가 지나면 자극적인 소리가 발생해도 거부감 없이 느껴지는 정도로 볼륨이 낮아지며 최적의 집중력을 유지할 수 있도록 도와주는 보조 아이템입니다.

QR code로 접속하셔서 동영상을 보시면 보다 쉽게 착용하실 수 있습니다.

<http://bit.ly/2wEszdb> 로 접속하셔도 됩니다.

착용 후 체크해 주세요!

- ㄱ. 착용 후 귀마개 A면이 얼굴 앞쪽을 향해야 합니다.
- ㄴ. 올바르게 착용이 되면 외부와 단절(약간 멍해지는)된 느낌이 듭니다.
- ㄷ. 올바르게 착용이 되면 손가락으로 건드려도 쉽게 빠지지 않습니다.
- ㄹ. 착용 전과 차이가 없다면, 휴대폰으로 착용 사진을 촬영하시고 QR Code로 접속 후 ‘착용사진 비교하기’를 참조해 주세요.

유지관리

제품의 내구성 및 부품 간의 고정력 유지를 위해 사용 중 주 1회 이상 귀마개에서 캡을 분리하신 뒤 중성 주방 세제로 세척 후 완전히 건조해서 사용하시기 바랍니다.
땀이 많이 발생하는 여름철에는 사용 후 1일 1회 세척을 권장합니다.